

## INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM DA VISEIRA

A montagem da viseira é simples. Em 20 segundos a montagem é feita.

### Material necessário:

- Viseira impressa em 3D;
- Acetato (entre 150 e 200 microns);
- Elástico de preferência de 1,5 a 2 cm de diâmetro, com 30 cm de comprimento por viseira;
- Furador (o espaçamento habitual de um furador é de 80 mm +/-)
- Template A4 (impresso)

### Instruções

1. Preparar o material (acetato, impressão 3D e elástico);
2. Preparar o furador;
3. Imprima o Template A4 que se encontra na segunda página. Não se esqueça é de imprimir sem redimensionamento, centrado e orientação horizontal, é crucial, vejam as definições de impressão no Adobe de outra forma a distância entre as mesmas vai mudar.
4. Com as duas marcas assinaladas no Template A4 use para alinhar o furador as linhas verticais que estão a vermelho. Usar um furador de papel normal, primeiro alinhar nos primeiros dois espaços e depois nos outros dois.
5. Usar os furos e encaixar na impressão 3D nas saliências de 'pins' que lá estão.
6. Introduza os elásticos nas extremidades na viseira impressa 3D.
7. Depois da montagem, pode com a tesoura arredondar as bordas dos acetatos.
8. Pronto a usar! A desinfeção é simples, os acetatos e impressão suportam 60 graus, contudo água e sabão, gel desinfetante é suficiente.

